


Kurzanleitung – FOB Test

Vom Patienten durchzuführen:

1. Probe auffangen




2. Probe sammeln

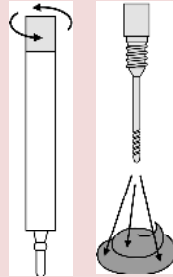

- Probesammelröhrchen aufschrauben und mit der Spitze Stuhl sammeln.
- An **3 unterschiedlichen Stellen** in den Stuhl stossen.


3. Spitze in das Röhrchen stossen und verschrauben

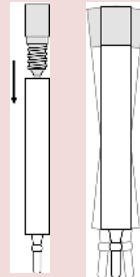

- Probesammelröhrchen in der Tüte verschliessen.
- Achtung: Ungekühlt **innerhalb 6 Stunden** beim Arzt abgeben!
Im Kühlschrank spätestens nach 3 Tagen

4. Probeflüssigkeit auf die Kassette geben.

- Nehmen Sie ein Papiertuch und brechen Sie die Verschlussspitze des Probensammelröhrchens vorsichtig mit einer drehenden Bewegung ab.

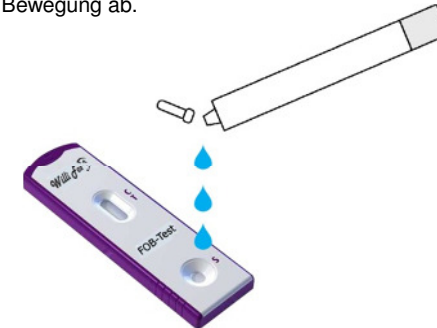

- **3 Tropfen** Probeflösung in die Probeöffnung der Testkassette geben.

5. 5 Minuten warten



- **Nicht länger als 10 Minuten** mit Ergebnis ablesen warten!!

6. Testergebnis ablesen

FOB Test positiv:



- **Kontrolllinie (C)** bestätigt korrekten Ablauf des Tests
- **Eine Testlinie (T)**

Zwei rote Linien erscheinen im Sichtfenster

Achtung: Die Farbintensität der Testlinie kann schwächer oder stärker sein als die der Kontrolllinie und zwischen rosa und rot variieren.

FOB Test negativ:



Nur eine rote Linie erscheint in der Kontrollregion (C):

Achtung: Innerhalb der Auswertungszeit von 5 bis 10 Minuten ablesen!

Ungültiges Testergebnis:



Keine rote Linie erscheint in der Kontrollregion (C).

Der Test ist ungültig und sollte wiederholt werden!